**ACCU-CHEK** Guide



# INSTRUCCIONES DE USO

**MEDIDOR DE GLUCEMIA** 



This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. "Holding Area" text, box and rules do not print.



Roche USA – 84014 V1/1 – 08682151061A / 08682151061(01) – Black

# PMS-MANUAL FOLD OUT



\_\_08682151061A\_\_08682151061\_\_01.indd 1 11/16/2021 8:37:22 AM

# Índice de contenidos

Introducción	
Capítulo 1: Su nuevo sistema	5
Capítulo 2: Mediciones de glucemia	11
Capítulo 3: Controles del funcionamiento	21
Capítulo 4: Ajustes del medidor	25
Capítulo 5: Consultar datos	36
Capítulo 6: Comunicación inalámbrica y sincronización del medidor	44
Capítulo 7: Mantenimiento del medidor y solución de problemas	51
Capítulo 8: Datos técnicos	60
Capítulo 9: Garantía	65
Índice	6

#### Introducción

Estas instrucciones de uso contienen indicaciones de advertencia y de precaución, así como notas:



# Una **ADVERTENCIA** indica un peligro previsible grave.

# **⚠ PRECAUCIÓN**

# Una PRECAUCIÓN describe una medida que debe tomar para utilizar el producto de manera segura y efectiva o para evitar daños en el producto.

### NOTA

Una **NOTA** llama la atención sobre información importante para ayudarte a sacar el máximo provecho del producto.

#### El sistema Accu-Chek Guide

El medidor Accu-Chek Guide, usado con las tiras reactivas Accu-Chek Guide, está previsto para realizar mediciones cuantitativas de glucemia en sangre capilar total fresca obtenida del dedo, la palma de la mano, el antebrazo o el brazo con el fin de analizar la eficacia del control de glucemia.

El medidor Accu-Chek Guide, usado con las tiras reactivas Accu-Chek Guide, está previsto para el autodiagnóstico in vitro por personas con diabetes.

El medidor Accu-Chek Guide, usado con las tiras reactivas Accu-Chek Guide, está previsto para las pruebas diagnósticas in vitro en el lugar de asistencia al paciente realizadas por el personal sanitario en ambientes hospitalarios. Las mediciones con sangre venosa, arterial y neonatal solo debe realizarlas el personal sanitario Este sistema no debe usarse para el diagnóstico de la diabetes mellitus, ni para realizar mediciones con muestras de sangre neonatal del cordón umbilical.

#### Autodiagnóstico

El sistema incluye: medidor de glucemia Accu-Chek Guide con pilas, tiras reactivas Accu-Chek Guide\* y soluciones de control Accu-Chek Guide\*.

\*Algunos artículos pueden no estar incluidos en el kit. Se pueden adquirir por separado.

11/16/2021 8:37:22 AM

#### Introducción

# $\Lambda$

#### **ADVERTENCIA**



#### Peligro de asfixia

Este producto contiene piezas pequeñas que pueden ser tragadas. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de niños pequeños y personas que puedan tragárselas.

#### Riesgo de lesiones potencialmente mortales

- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. La ingesta o introducción en el cuerpo puede causar quemaduras químicas, perforación de los tejidos blandos y la muerte. En un plazo de 2 horas desde la ingesta pueden ocasionarse quemaduras graves. Si cree que una pila puede haber sido ingerida o introducida en alguna parte del cuerpo, solicite atención médica inmediatamente.
- Si el compartimento de las pilas no se cierra de modo seguro, deje de utilizar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
   Póngase en contacto con Roche.

# 

#### Riesgo de infección

Cualquier objeto que entra en contacto con sangre humana es una posible fuente de infección (vea: Clinical and Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Fourth Edition; CLSI document M29-A4, May 2014). Personal sanitario: consulte también el apartado Información para el personal sanitario del capítulo Datos técnicos.

# Riesgo de un incidente grave para la salud

Si no se siguen las instrucciones para realizar la medición o las instrucciones de almacenamiento y manejo de las tiras reactivas, puede obtenerse un resultado de glucemia incorrecto que conduzca a un tratamiento inadecuado. Lea detenidamente las indicaciones de las instrucciones de uso y de los prospectos de las tiras reactivas y las soluciones de control.

# Por qué es importante medir la glucemia regularmente

Realizar mediciones de glucemia regularmente puede implicar una gran diferencia en la manera en que Ud. controla su diabetes diariamente. Lo hemos simplificado al máximo.

#### Introducción

# Información importante acerca de su nuevo medidor

- Se recomienda tener a mano un método alternativo para realizar las mediciones. La imposibilidad de realizar una medición puede conllevar retrasos en las decisiones terapéuticas y causar así serios problemas de salud. Algunos ejemplos de métodos alternativos son un medidor y tiras reactivas de reserva. Consulte al personal sanitario que le atiende o al farmacéutico si desea más información sobre otros posibles métodos alternativos.
- El medidor puede solicitar que elija un idioma y el formato de hora (12 horas o 24 horas) la primera vez que lo encienda.
- Compruebe la hora y la fecha en el medidor antes de empezar a realizar mediciones. Ajuste la hora y la fecha si es necesario.
- A lo largo de las instrucciones de uso se muestran ejemplos de pantallas con datos. Sus datos serán distintos.
- Si sigue los pasos de estas instrucciones de uso, pero aún presenta síntomas que no parecen coincidir con los resultados de medición obtenidos, o si tiene dudas, póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende.

# Notificación de incidentes graves

Para un paciente/usuario/tercero en la Unión Europea y en países con un régimen normativo idéntico: si, durante el uso de este dispositivo o como resultado de su uso, se ha producido un incidente grave, comuníquelo al fabricante y a su autoridad nacional.

#### El medidor Accu-Chek Guide



Vista frontal

Vista posterior

Vista lateral

#### 1. Pantalla

Muestra resultados, mensajes y resultados de medición guardados en la memoria.

#### 2. Tecla Atrás

Púlsela para volver a una pantalla o un campo anterior.

#### Teclas flecha arriba y flecha abajo Púlselas para desplazarse entre las opciones de menú o para aumentar o reducir números.

#### 4. Tecla On/Off/Set/OK

Púlsela para encender y apagar el medidor y ajustar las opciones.

# 5. Ranura de la tira reactiva con luz Inserte la tira reactiva por aguí.

#### 6. Tapa del compartimento de las pilas

Ábrala para cambiar las pilas.

#### 7. Puerto micro USB

Se usa para transferir datos del medidor a un ordenador.

#### 8. Expulsor de tiras reactivas

Presiónelo para expulsar la tira reactiva.



- 9. Tubo de tiras reactivas\* (ejemplo)
- 10. Tira reactiva\* Extremo metálico Inserte este extremo en el medidor.
- 11. Tira reactiva\* Borde amarillo Rócelo con la gota de sangre o la solución de control.
- 12. Frasco de solución de control\*
- 13. Pilas
- 14. Cable USB\*

Conecta el medidor con un ordenador.


\*Algunos artículos pueden no estar incluidos en el kit. Se pueden adquirir por separado.

#### Funciones de las teclas

A continuación figuran las funciones de la tecla Atrás, las teclas de las flechas y la tecla On/Off/Set/OK del medidor. Estas funciones se usan a lo largo de estas instrucciones de uso. En el capítulo Ajustes del medidor hallará instrucciones específicas para configurar el medidor.

Tecla	Función	
Tecla Atrás	Volver a la pantalla anterior. Volver al campo anterior.	
Teclas flecha arriba y flecha abajo	Navegar hacia arriba y hacia abajo en el menú. Aumentar o reducir un número.	
Tecla On/Off/Set/ OK	Púlsela brevemente para encender el medidor. Púlsela y manténgala pulsada para apagar el medidor. Púlsela para seleccionar una opción. Púlsela para pasar al campo o a la pantalla siguiente. Púlsela para guardar una opción. Con el medidor apagado, púlsela y manténgala pulsada para comprobar la pantalla del medidor.  Chequeo pantalla	

#### Menús del medidor

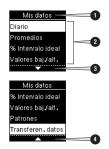

- 1. Título de la pantalla o del menú
- 2. Opciones de menú
- 3. Desplazar hacia abajo
- 4. Desplazar hacia arriba

Pantalla	Descripción
	Hay más opciones de menú debajo de la última opción. Pulse en el medidor para ver las opciones.
	Hay más opciones de menú encima de la primera opción. Pulse en el medidor para ver las opciones.
<b>A</b>	Hay más opciones de menú encima y debajo de las opciones. Pulse ▼ o ▼ en el medidor para ver las opciones.
9:38 12/11/15 Menú principal	Opción resaltada ( <b>Medición</b> ) Pulse 🌃 para entrar en el menú <b>Medición</b> .
HH MM 9: 38 DD MM AA 12/11/15	Campo resaltado ( <b>HH</b> = Hora) Pulse <b>□</b> o <b>□</b> para aumentar o disminuir la hora. Pulse <b>□</b> para guardar la hora y pasar al campo de los minutos.

#### Símbolos

Lista de los símbolos de la pantalla del medidor.

Símbolo	Descripción
1	Encima del intervalo ideal
Ì	Después de la comida
)	Al acostarse
ď	Antes de la comida
Ţ	Debajo del intervalo ideal
•	Medición de glucemia
<b>*</b>	Marca de verificación / Control del funcionamiento correcto / Opción o ajuste seleccionado
C	Frasco de solución de control
×	Control del funcionamiento incorrecto
0	Editar
×	Error
0	En ayunas
<b>†</b>	Modo avión
?	Ayuda
<u> </u>	Pila casi gastada
4	Mis datos
	No hay marcador

Símbolo	Descripción
*	Otro
<b>:</b>	Total datos
₽	Ajustes
\( \( \)	Recordatorio de medición
<u>(1)</u>	Advertencia
<b>‡</b>	Dentro del intervalo ideal

# Ajustar el idioma y el formato de hora


El medidor puede solicitar que elija un idioma y el formato de hora (12 horas o 24 horas) la primera vez que lo encienda.



Encienda el medidor pulsando brevemente . Aparece el menú Language (Idioma).



Pulse o para resaltar el idioma.
Pulse da para guardar el idioma deseado y volver al Menú principal.

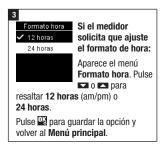


# NOTA

Si selecciona un idioma incorrecto y no puede cambiarlo, póngase en contacto con Roche.

# ∧ ADVERTENCIA

# Riesgo de un incidente grave para la salud

El uso de la unidad de medida incorrecta puede llevar a una malinterpretación de su nivel real de glucemia y conducir a un tratamiento incorrecto. Los resultados de glucemia se pueden visualizar en mg/dL o bien en mmol/L. La unidad de medida está indicada en la etiqueta en la parte posterior del medidor. Si el medidor muestra la unidad de medida incorrecta, póngase en contacto con Roche. Si no sabe cuál es la unidad de medida correcta para Ud., póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende.

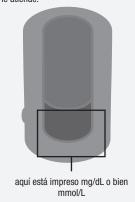

#### Usar el sistema Accu-Chek Guide

#### ∧ ADVERTENCIA

# Riesgo de un incidente grave para la salud

- Si se le ha caído el medidor, o si se le ha caído el medidor con una tira reactiva insertada, el medidor y/o la tira reactiva pueden estar dañados. Deseche la tira reactiva y realice un control del funcionamiento con una tira reactiva nueva, no usada, y solución de control para asegurarse de que el medidor y las tiras reactivas funcionan correctamente. A continuación, repita la medición de glucemia con una tira reactiva nueva.
- Una tira reactiva que no se almacene o utilice correctamente puede causar un resultado de glucemia incorrecto.
- ¡No almacene las tiras reactivas en ambientes sumamente calientes o húmedos (baño o cocina)! El calor y la humedad pueden dañar las tiras reactivas.
- Use únicamente tiras reactivas Accu-Chek Guide
- Use la tira reactiva inmediatamente después de retirarla del tubo de tiras reactivas.
- No aplique sangre o solución de control a la tira reactiva antes de insertarla en el medidor.
- Cierre el tubo de tiras reactivas hermética e inmediatamente después de retirar una tira reactiva para proteger las tiras reactivas de la humedad.

- Almacene las tiras reactivas no usadas en el tubo original cerrado.
- Compruebe la fecha de caducidad del tubo de tiras reactivas. No use las tiras reactivas pasada dicha fecha.
- Almacene el tubo de tiras reactivas y el medidor en un lugar fresco y seco, como por ejemplo un dormitorio.
- Consulte las condiciones para el almacenamiento de las tiras reactivas y las condiciones de funcionamiento del sistema en el prospecto de las tiras reactivas.

# Realizar una medición de glucemia con sangre de la yema del dedo

#### NOTA

- Antes de realizar la primera medición de glucemia, ajuste el medidor correctamente.
- Para realizar una medición de glucemia, necesita el medidor, una tira reactiva y un dispositivo de punción con una lanceta insertada.
- Cuando el medidor está conectado a un ordenador mediante un cable USB, no es posible realizar una medición de glucemia.
- Existen 2 maneras de iniciar una medición de glucemia.
  - Inserte una tira reactiva en el medidor.
  - Encienda el medidor pulsando brevemente Seleccione
     Medición > OK.



Lávese las manos con agua jabonosa templada y séqueselas completamente.

Prepare el dispositivo de punción.



Compruebe la fecha de caducidad del tubo de tiras reactivas.

No use las tiras reactivas pasada su

fecha de caducidad.



Retire una tira reactiva del tubo de tiras reactivas.

Cierre el tubo herméticamente con la tapa.



Inserte el extremo metálico de la tira reactiva en el medidor.



El medidor se enciende. Aparece **Preparando la medición** 

12

\_\_08682151061A\_0868215106i\_01.indd 12



Cuando aparezca
Aplicar gota,
efectúe una punción
en la yema del dedo
con el dispositivo de
punción.



Apriétese ligeramente el dedo para estimular el flujo de sangre. Esto le ayuda a obtener una gota de sangre.



Roce el **borde amarillo** de la tira
reactiva con la gota
de sangre. No
aplique sangre
encima de la tira
reactiva





Retire el dedo de la tira reactiva cuando aparezca **Analizando**.



o 4.7 4.7 Añadir marcador

El resultado de glucemia aparece en la pantalla.

Existe la opción de añadir un marcador al resultado de glucemia pulsando S O BIEN proceder al paso 11 para completar la medición.





Aparece Añadir marca.. Pulse para resaltar un marcador. Pulse para guardar el marcador para el resultado de glucemia. Consulte los detalles en el apartado Añadir marcadores a resultados de glucemia de este capítulo.

# 7:38

mg/dL Antes comida

12/11/15

o 12/11/15 Antes comida

Aparece el resultado final. Pulse 

↑ para guardar el marcador y volver al Menú principal. Si desea cambiar el marcador pulse 

para para seleccionar otro marcador.

Pulse para volver a **Añadir** marca..

#### NOTA

Cuando realice una medición de glucemia: si aparece la pantalla Res. de control, se ha producido un error.

- No tome medidas basándose en el resultado de glucemia.
- Deseche la tira reactiva y repita la medición de glucemia con una tira reactiva nueva.

#### 12

Retire y deseche la tira reactiva usada, para ello extráigala del medidor tirando de ella o presione el expulsor de tiras reactivas situado en un lado del medidor.



Presione aquí para expulsar la tira reactiva

#### Advertencias de glucemia

Si el resultado de glucemia está fuera del intervalo de medición del medidor se visualizará una advertencia. Pulse para confirmar que ha visto la advertencia LO o HI – SI NO el medidor mostrará automáticamente la pantalla de resultado LO o HI.





El nivel de glucemia puede estar por debajo del intervalo de medición del sistema. Consulte el apartado Resultados de glucemia no esperados de este capítulo.





El nivel de glucemia puede estar por encima del intervalo de medición del sistema. Consulte el apartado Resultados de glucemia no esperados de este capítulo.

# Añadir marcadores a resultados de glucemia

#### NOTA

El análisis de los resultados de glucemia guardados en el medidor es una manera eficaz, para Ud. y para el personal sanitario que le atiende, de determinar si está controlando bien su diabetes. Dicho análisis es una valiosa herramienta para mejorar el control de la diabetes. Cuando añada marcadores a los resultados de glucemia hágalo con cuidado. Los marcadores incorrectos pueden provocar que el medidor detecte patrones inadecuados si la función Patrones está ajustada en Activar

#### Resumen

Es muy importante que la hora y la fecha estén ajustadas correctamente en el medidor. Si la hora y la fecha ajustadas son correctas, Ud. y el personal sanitario que le atiende podrán interpretar adecuadamente la información.

- Es posible añadir marcadores a los resultados de glucemia para ayudarle a Ud. y al personal sanitario que le atiende a analizar los patrones detectados por el medidor (consulte los detalles en el apartado Patrones del capítulo Ajustes del medidor).
- Si la función Patrones está ajustada en Activar, cuando se ha detectado un patrón NO es posible cambiar el marcador añadido a un resultado de glucemia (consulte los detalles en el apartado Patrones del capítulo Ajustes del medidor).

 El marcador y el símbolo se guardan con los resultados de glucemia al añadir el marcador

Lista de símbolos de los marcadores que se pueden añadir a un resultado de glucemia.

Símbolo	Nombre	Descripción
ď	Antes de la comida	Si la función Patrones está ajustada en Activar, seleccione Antes desayuno, almuerzo, cena o aperitivo (consulte cómo añadir marcadores con la función Patrones ajustada en Activar en la página siguiente).
Ĭ	Después de la comida	Si la función Patrones está ajustada en <b>Activar</b> , seleccione Después desayuno, almuerzo, cena o aperitivo (consulte cómo añadir marcadores con la función Patrones ajustada en <b>Activar</b> en la página siguiente).
0	En ayunas	Seleccione En ayunas cuando no haya habido ingesta calórica durante al menos 8 horas.*
)	Al acostarse	
*	Otro	Puede usar este marcador para marcar un evento especial, como un resultado de glucemia obtenido con sangre de un lugar alternativo o después de haber hecho ejercicio.
	Ning. entrada (Ninguna entrada)	No desea añadir ningún marcador.     Desea eliminar un marcador del resultado de glucemia actual.

<sup>\*</sup>American Diabetes Association: Standards of Medical Care in Diabetes-2020.

16





Aparece el menú **Añadir marca.**.
Pulse **■** para resaltar el marcador deseado (**Antes comida** en el ejemplo). Pulse **■** para seleccionar el marcador.

\_08682151061A\_08682151061\_01.indd 16



Si la función Patrones está ajustada en Activar:

Si la función **Patrones** está

ajustada en **Activar** y selecciona **Antes comida** o **Desp. comida**, pulse

■ para seleccionar una comida específica (Desayuno, Almuerzo, Cena o Aperitivo). Pulse ☑ para guardar la comida seleccionada para el resultado de glucemia.

9:38 12/11/15 **85** mg/dL Antes desayuno



El resultado final aparece con el símbolo del marcador. Pulse os para guardar el marcador y volver al **Menú principal**.

Si desea cambiar el marcador pulse para seleccionar otro marcador.

Pulse para volver a **Añadir** 

Realizar una medición de glucemia con sangre de la palma de la mano, del antebrazo o del brazo (medición en lugares alternativos, AST)

# **ADVERTENCIA**

# Riesgo de un incidente grave para la salud

El nivel de glucemia cambia más rápidamente en la yema del dedo y en la palma de la mano que en el antebrazo y el brazo. Realizar una medición de glucemia con sangre del antebrazo o del brazo puede hacer que malinterprete su nivel real de glucemia y conducir a una terapia inadecuada.

- No utilice la medición en lugares alternativos (AST) para calibrar un sistema de monitorización continua de glucosa.
- No utilice la medición en lugares alternativos para calcular dosis de insulina.
- Las mediciones en lugares alternativos deben realizarse únicamente durante los periodos en que el estado es estable (cuando la glucemia no cambia rápidamente).

Tiene la opción de obtener una muestra de sangre de otras partes de su cuerpo que no sean la yema del dedo. Los lugares alternativos incluyen la palma de la mano, el antebrazo y el brazo.

La sangre de la yema del dedo o de la palma de la mano se puede usar en cualquier momento para realizar una medición de glucemia. Si se usa sangre del antebrazo o del brazo, hay determinados momentos que no son adecuados para realizar una medición.

Lea el siguiente apartado antes de intentar realizar mediciones con sangre del antebrazo o del brazo.

Puede realizar una medición con sangre del antebrazo o del brazo	inmediatamente antes de una comida.     en ayunas.
NO debe realizar una medición con sangre del antebrazo o del brazo	hasta 2 horas después de una comida, cuando los valores de glucemia pueden aumentar rápidamente.     después de inyectar insulina de bolo, cuando los valores de glucemia pueden disminuir rápidamente.     después de hacer ejercicio.     si está enfermo.     si piensa que su nivel de glucemia es bajo (hipoglucemia).     si a veces no se da cuenta de que su nivel de glucemia es bajo.

Si está interesado en el procedimiento AST, póngase primero en contacto con el personal sanitario que le atiende.

Para obtener un capuchón AST e instrucciones detalladas para el procedimiento AST, póngase en contacto con Roche.

# Resultados de glucemia no esperados

# **A PRECAUCIÓN**

#### Riesgo de un incidente grave para la salud

Si sus resultados de glucemia no coinciden con cómo se siente, repase la siguiente lista para resolver el problema.

Posibles fuentes de error	Acción
¿Se ha lavado las manos?	Lávese las manos con agua jabonosa templada y séqueselas completamente. Repita la medición de glucemia con una tira reactiva nueva.
¿Las tiras reactivas estaban caducadas?	Deseche las tiras reactivas pasada su fecha de caducidad. Repita la medición de glucemia con una tira reactiva no caducada.
¿El tubo de tiras reactivas ha estado siempre cerrado herméticamente?	Sustituya las tiras reactivas si piensa que el tubo de tiras reactivas ha estado abierto durante algún tiempo. Repita la medición de glucemia.
¿Ha usado la tira reactiva inmediatamente después de retirarla del tubo de tiras reactivas?	Repita la medición de glucemia con una tira reactiva nueva.
¿Ha almacenado las tiras reactivas en un lugar fresco y seco?	Repita la medición de glucemia con una tira reactiva debidamente almacenada.
¿Ha seguido las instrucciones?	Lea el capítulo Mediciones de glucemia y repita la medición de glucemia. Póngase en contacto con Roche si aún tiene problemas.
¿El medidor y las tiras reactivas funcionan correctamente?	Realice un control del funcionamiento. Consulte las instrucciones en el capítulo Controles del funcionamiento.
¿Aún no está seguro de cuál es la causa?	Póngase en contacto con Roche.

# Síntomas de un nivel de glucemia bajo o alto

# ∧ ADVERTENCIA

#### Riesgo de hipoglucemia

El conocimiento de los síntomas de un nivel de glucemia bajo o alto puede ayudarle a interpretar los resultados de medición y a decidir cómo actuar si obtiene resultados de medición no esperados.

- Si sufre alguno de los siguientes síntomas u otros síntomas no habituales, realice una medición de glucemia con sangre de la yema del dedo o de la palma de la mano.
- Si su resultado de glucemia aparece como LO o HI, póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende inmediatamente.

Nivel de glucemia bajo (hipoglucemia): los síntomas de hipoglucemia pueden incluir, entre otros, ansiedad, temblores, sudoración, dolor de cabeza, más hambre de lo normal, mareos, palidez, cambios de humor repentinos o irritabilidad, fatiga, dificultad para concentrarse, torpeza, palpitaciones y/o confusión.

Nivel de glucemia alto (hiperglucemia): los síntomas de hiperglucemia pueden incluir, entre otros, más sed de lo normal, micción frecuente, visión borrosa, somnolencia y/o pérdida de peso inexolicable.

# Efectos y prevalencia de la enfermedad

Para obtener información sobre los efectos y la prevalencia de la diabetes en su zona, visite la página web de la Federación Internacional de Diabetes en www.idf.org o envíe un correo electrónico a info@idf.org. Para obtener más asesoramiento o información sobre la línea de ayuda, consulte a la organización nacional de diabetes de su país.

#### Cuándo realizar un control del funcionamiento

Un control del funcionamiento le permite comprobar si el medidor y las tiras reactivas funcionan correctamente. Debería realizar un control del funcionamiento cuando:

- · abre un nuevo envase de tiras reactivas.
- ha dejado el tubo de tiras reactivas abierto.
- piensa que las tiras reactivas están dañadas
- desea comprobar el buen funcionamiento del medidor y de las tiras reactivas
- las tiras reactivas han estado almacenadas a temperaturas extremas y/o en ambientes húmedos.
- se le ha caído el medidor.
- su resultado de medición no coincide con cómo se siente.
- desea comprobar que está realizando la medición correctamente.

#### Acerca de las soluciones de control

- Use únicamente soluciones de control Accu-Chek Guide.
- Cierre el frasco de solución de control herméticamente después de usarlo.
- Anote en la etiqueta del frasco de solución de control la fecha en que abre el frasco. La solución de control debe desecharse después de 3 meses contados desde la fecha en que se abre el frasco de solución de control (fecha de eliminación), o en la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del frasco, según lo que se cumpla antes.
- No use la solución de control pasada su fecha de caducidad o de eliminación.

- Consulte las condiciones para el almacenamiento de la solución de control en el prospecto de la solución de control.
- El medidor reconoce automáticamente la diferencia entre la solución de control y la sangre.
- Los resultados de control no se muestran en la memoria.
- La solución de control puede manchar los tejidos. Elimine las manchas con aqua y jabón.

#### Realizar un control del funcionamiento

Necesita el medidor, una tira reactiva y solución de control del nivel 1 (Control 1) o del nivel 2 (Control 2).



Compruebe la fecha de caducidad del tubo de tiras reactivas. No use las tiras reactivas pasada su fecha de caducidad.



Retire una tira reactiva del tubo de tiras reactivas.

Cierre el tubo herméticamente con la tapa.



Inserte el extremo metálico de la tira reactiva en el medidor. Coloque el medidor en una superficie plana.

11/16/2021 8:38:42 AM



El medidor se enciende. Aparece Preparando la medición



Aparece Aplicar gota.



Seleccione la solución de control a usar. Podrá especificar el nivel en una fase posterior del control.





Retire la tapa del frasco. Limpie la punta del frasco con un paño. Apriete el frasco hasta que se forme

6



Roce el **borde** amarillo de la tira reactiva con la gota. No aplique solución de control encima de la tira reactiva.



Aparece Analizando cuando hav suficiente solución de control en la tira reactiva.



Res, de control 12/11/15 2,8 mmol/L Seleccionar nivel

Aparecen Res. de control y el símbolo del frasco de solución de control. Pulse o para seleccionar el nivel de control que ha utilizado. Si no selecciona ningún nivel, el resultado de control se guarda sin nivel de control. Pulse 🍱

#### NOTA

Cuando realice un control del funcionamiento: si NO aparece la pantalla Res. de control, se ha producido un error.

- No tome medidas basándose en el resultado de control.
- Deseche la tira reactiva y repita el control del funcionamiento con una tira reactiva nueva.

8





**Dentro de rango** y ✓ aparecen si el resultado de control está dentro del rango aceptable.





Fuera de rango y X aparecen si el resultado de control está fuera del rango aceptable.

Interpretar resultados de control fuera del rango aceptable

# ∧ ADVERTENCIA

# Riesgo de un incidente grave para la salud

Los resultados de medición incorrectos pueden conducir a recomendaciones terapéuticas incorrectas.

Los rangos de concentración están impresos en la etiqueta del tubo de tiras reactivas. Si el resultado de control está fuera del rango aceptable, compruebe que el medidor y las tiras reactivas funcionen correctamente. Repase la siguiente lista para resolver el problema.

9



Limpie la punta del frasco con un paño. Cierre el frasco herméticamente.

Retire y deseche la tira reactiva usada.

# NOTA

El medidor se apaga 90 segundos después de un control del funcionamiento realizado con éxito o 15 segundos después de retirar la tira reactiva si no se realiza ninguna otra acción.

Posibles fuentes de error	Acción
¿Las tiras reactivas o las soluciones de control estaban caducadas?	Deseche las tiras reactivas o la solución de control pasada su fecha de caducidad. Si la solución de control lleva abierta más de 3 meses, deséchela. Repita el control del funcionamiento con una tira reactiva y una solución de control que no estén caducadas.
¿Ha limpiado la punta del frasco de solución de control antes de usarlo?	Limpie la punta del frasco con un paño. Repita el control del funcionamiento con una tira reactiva nueva y otra gota de solución de control.
¿El tubo de tiras reactivas y el frasco de solución de control han estado siempre cerrados herméticamente?	Sustituya las tiras reactivas o la solución de control si piensa que han estado abiertas durante algún tiempo. Repita el control del funcionamiento.
¿Ha usado la tira reactiva inmediatamente después de retirarla del tubo de tiras reactivas?	Repita el control del funcionamiento con una tira reactiva nueva y otra gota de solución de control.
¿Ha almacenado las tiras reactivas y las soluciones de control en un lugar fresco y seco?	Repita el control del funcionamiento con una tira reactiva o una solución de control debidamente almacenadas.
¿Ha seguido las instrucciones?	Lea el capítulo Controles del funcionamiento y repita el control del funcionamiento.
¿Ha seleccionado el nivel de solución de control correcto, es decir, 1 o 2, al realizar el control del funcionamiento?	Si ha seleccionado el nivel de solución de control erróneo, aún puede comparar el resultado de control con el rango impreso en el tubo de tiras reactivas.
¿Aún no está seguro de cuál es la causa?	Póngase en contacto con Roche.


#### Resumen

Puede adaptar los siguientes ajustes del medidor en función de sus preferencias personales. Consulte los detalles y cómo ajustar las opciones en los apartados siguientes de este capítulo.

Ajuste	Opciones	Función	
Hora/fecha	Hora / fecha	Ajuste la hora y la fecha.	
Señal sonora	Activar / Desactivar	Seleccione Activar o Desactivar.	
Inalámbrico	Seleccione los ajustes de comunicación inalámbrica. Consulte el capítulo Comunicación inalámbrica y sincronización del medidor.		
Intervalos ideales	Desactivar / Intervalo único / 2 intervalos	Seleccione el intervalo ideal de glucemia apropiado para Ud.	
		NOTA	
		Póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende para determinar el intervalo ideal adecuado para Ud.	
		Desactivar: no aparecen símbolos de flecha de intervalo ideal junto con el resultado de glucemia. La función Patrones está ajustada en <b>Desactivar</b> (consulte los detalles en el apartado Patrones de este capítulo).	
	70–180 mg/dL (intervalo ideal predeterminado) 3,9–10,0 mmol/L (intervalo ideal predeterminado)	Intervalo único: los resultados de glucemia están marcados como por encima, dentro o por debajo del intervalo en base al intervalo ideal único ajustado en el medidor.	
	Intervalo Antes comida 70–110 mg/dL (intervalo ideal predeterminado) 3,9–6,1 mmol/L (intervalo ideal predeterminado) Intervalo Desp. comida (Después comida) 70–180 mg/dL (intervalo ideal predeterminado)	2 intervalos: ajuste intervalos de antes de la comida y de después de la comida. Los resultados de glucemia están marcados como por encima, dentro o por debajo del intervalo en base a los 2 intervalos ideales (antes de la comida y después de la comida) ajustados en el medidor.	
	3,9–10,0 mmol/L (intervalo ideal predeterminado)		

Ajuste	Opciones	Función
Patrones	Activar / Desactivar	Activar: un patrón se detecta cuando en un periodo de 7 días se detectan 2 resultados de glucemia por debajo o 3 resultados de glucemia por encima del intervalo con el mismo marcador.
Recordatorios	Activar / Desactivar / Editar hora	Activar: configure hasta 4 recordatorios por día para recordarle que realice una medición.
Después comida	Activar / Desactivar / Editar hora	Activar: le recuerda que realice una medición de glucemia después de la comida.
Último resultado	Activar / Desactivar	Seleccione si el resultado de glucemia anterior (dentro de las últimas 24 horas) aparece o no junto al resultado de glucemia actual.
		Activar: el resultado de glucemia anterior aparece con el resultado de glucemia actual.
		Desactivar: aparece únicamente el resultado de glucemia actual.
Idioma		Seleccione el idioma para el medidor.
Formato de hora	12 horas / 24 horas	Seleccione el formato del reloj para el medidor.

# Hora/fecha

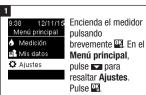





#### Señal sonora

La señal sonora le avisa:

- · cuando se inserta una tira reactiva.
- cuando debe aplicar sangre o solución de control a la tira reactiva.

- cuando la tira reactiva ha absorbido suficiente sangre o solución de control.
- cuando ha finalizado la medición de glucemia o el control del funcionamiento.
- cuando se enciende el medidor.
- · cuando se pulsa una tecla.
- cuando es la hora de realizar una medición (si las funciones Recordatorios o Después comida están ajustadas en Activar).
- cuando se insertan las pilas.
- cuando no hay resultados de glucemia guardados o hay un registro no válido en el diario
- cuando no hay errores en el registro de errores.
- cuando se ha producido un error (la señal sonora suena avisándole de un error incluso cuando está desactivada).



Encienda el medidor pulsando brevemente ☑. En el Menú principal, pulse ☑ para resaltar Ajustes.
Pulse ☑.



Pulse para resaltar **Señal** sonora. Pulse .



#### Intervalos ideales

El personal sanitario que le atiende puede decirle cuál es el intervalo ideal de glucemia adecuado para Ud. Es muy importante que sus valores de glucemia permanezcan dentro del intervalo ideal.

Los intervalos ideales se pueden ajustar desde un límite inferior de 60–100 mg/dL (3,3–5,5 mmol/L) hasta un límite superior de 101–300 mg/dL (5,6–16,6 mmol/L).

Opciones	Función
Desactivar	Los símbolos de flechas
	para indicar por encima,
	dentro o por debajo de
	intervalos ideales no
	aparecen junto con los
	resultados de glucemia.
Intervalo	Ajuste el límite inferior y el
único	límite superior para el
	intervalo ideal.
	Se solicitará que active la
	función Patrones si lo
	desea (consulte los
	detalles en el apartado
	Patrones de este capítulo).

\_08682151061A\_08682151061\_0.1indd 27

2 intervalos Ajuste los límites inferiores v superiores para los intervalos ideales antes de la comida y después de la comida. Debe marcar sus resultados de glucemia con un marcador para que el medidor detecte resultados de glucemia que están por encima, dentro o por debajo de los intervalos ideales de antes de la comida o después de la comida (consulte los detalles en el apartado Añadir marcadores a resultados de glucemia del capítulo Mediciones de glucemia). Se solicitará que active la función Patrones si lo desea (consulte los detalles en el apartado Patrones de este capítulo).

Si la función Intervalos ideales está activada, los siguientes símbolos aparecen con los resultados de glucemia.

# Símbolo Significado El resultado de glucemia está por debajo del intervalo ideal. El resultado de glucemia está dentro del intervalo ideal. El resultado de glucemia está por encima del intervalo ideal.

#### NOTA

Esta función no sustituye a una formación adecuada sobre la hipoglucemia proporcionada por el personal sanitario.





Pulse para resaltar **Más** opciones. Pulse <sup>©</sup>S.



Intervalos ideales está resaltado. Pulse <sup>QK</sup>.



28

Pulse o para resaltar Desactivar, Intervalo único o 2 intervalos. Pulse para seleccionar una opción (2 intervalos en el ejemplo).

1

L\_08682151061A\_08682151061\_01.indd 28

Interv.ideales
Antes comida
70 - 130
Desp. comida
70 - 180

Interv. ideales
Antes comida
3.9 - 7.2
Desp. comida
3.9 - 9.9
mmol/L

Pulse opara ajustar el límite inferior del intervalo ideal de Antes comida. Pulse para guardar y pasar al campo siguiente.

Continúe para ajustar el límite superior para el intervalo ideal de Antes comida y los límites inferior y superior para el intervalo ideal de Deso. comida. Pulse 🖾



② Ayuda

✓ aparece junto a la opción seleccionada.

Pulse para volver al menú anterior.



Es posible que el medidor le pregunte si desea activar la función Patrones.

Pulse para resaltar **Sí** o **No**.

Pulse para guardar la opción y volver al menú anterior (consulte los detalles en el apartado Patrones de este capítulo).

#### NOTA

El análisis de los resultados de glucemia guardados en el medidor es una manera eficaz, para Ud. y para el personal sanitario que le atiende, de determinar si está controlando bien su diabetes. Dicho análisis es una valiosa herramienta para mejorar el control de la diabetes. Cuando añada marcadores a los resultados de glucemia hágalo con cuidado. Los marcadores incorrectos pueden provocar que el medidor detecte patrones inadecuados si la función Patrones está ajustada en **Activar**.

#### **Patrones**

El medidor detecta un patrón cuando en un periodo de 7 días se detectan 2 resultados de glucemia por debajo (Patrón bajo) o 3 resultados de glucemia por encima (Patrón alto) del intervalo ideal con el mismo marcador.

- El medidor NO detecta un patrón para el marcador "Otro" añadido a los resultados de glucemia.
- Es muy importante que la hora y la fecha estén ajustadas correctamente en el medidor. Si la hora y la fecha ajustadas son correctas, Ud. y el personal sanitario que le atiende podrán interpretar adecuadamente la información
- Solo los resultados de glucemia marcados con marcadores se incluirán en los patrones. Si los resultados de medición LO o HI se marcan con marcadores, los resultados de medición pasan a formar parte de los patrones (consulte los detalles en el capítulo Mediciones de glucemia).

 Para usar la función Patrones es necesario ajustar la función Intervalos ideales en el medidor. Si la función Intervalos ideales no está ajustada, el medidor solicitará que lo haga.



Encienda el medidor pulsando brevemente . En el Menú principal, pulse para resaltar Ajustes.



Pulse para resaltar **Más** opciones. Pulse ...





(Para **Desactivar** la función Patrones seleccione **No**. Pulse **1** para volver a **Patrones**.)



En la pantalla aparece Interv. ideales (consulte los detalles para ajustar los intervalos ideales en el apartado

Intervalos ideales de este capítulo).

Si la función Patrones está ajustada en **Activar** y se detecta un patrón nuevo con un resultado de glucemia, aparece un mensaje en la pantalla.



Pulse para seleccionar petalles para ver los resultados de glucemia que conforman el patrón.

0



Pulse para resaltar Ver después.

Pulse 🍱 para volver a la pantalla anterior.

#### Recordatorios

Es posible configurar hasta 4 recordatorios de medición generales por día para recordarle que realice una medición. Se emite una serie de señales sonoras y se visualiza 🗘 para los recordatorios ajustados en el medidor.


#### Los recordatorios:

- se apagan al insertar una tira reactiva o al pulsar cualquier tecla.
- se posponen hasta el siguiente recordatorio si se ha realizado una medición durante los 15 minutos anteriores a un recordatorio de medición.
- no aparecen/suenan si el medidor está encendido a la hora del recordatorio de medición (incluso si el medidor está conectado a un cable USB).
- no aparecen/suenan si el medidor está conectado y comunicándose con un gestor Continua Certified<sup>®</sup>.
- no suenan si la señal sonora del medidor está desactivada.
- no aparecen/suenan si es necesario cambiar las pilas.

#### **Ajustar recordatorios**

- Las horas de los recordatorios de medición están preajustadas para las 8:00, 12:00, 18:00 y 22:00. Para cambiar las horas de los recordatorios de medición siga las instrucciones que se indican a continuación.
- Si un recordatorio de medición general está ajustado para la misma hora que un recordatorio de después de la comida, este aparecerá/sonará en lugar del recordatorio general (consulte los detalles en el apartado Recordatorios de después de la comida de este capítulo).



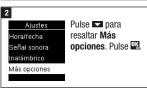





En la pantalla aparecen las horas predeterminadas de los recordatorios. Pulse para resaltar la hora de

un recordatorio. Pulse 48.







Pulse Pulse

para resaltar Desactivar.



# Recordatorios de después de la comida

Los recordatorios de después de la comida se pueden ajustar para recordarle que repita la medición más tarde cuando añada un marcador de antes de la comida a un resultado de glucemia. Cuando se emite un recordatorio suena una serie de señales sonoras y se visualiza 4.

Los recordatorios de después de la comida:

- se apagan al insertar una tira reactiva o al pulsar cualquier tecla.
- se posponen hasta el siguiente recordatorio si se ha realizado una medición durante los 15 minutos anteriores a un recordatorio de medición.
- no aparecen/suenan si el medidor está encendido a la hora del recordatorio de medición (incluso si el medidor está conectado a un cable USB).
- no aparecen/suenan si el medidor está conectado y comunicándose con un gestor Continua Certified<sup>®</sup>.
- no suenan si la señal sonora del medidor está desactivada.
- no aparecen/suenan si es necesario cambiar las pilas.

# Ajustar recordatorios de después de la comida

- Al añadir un marcador de antes de la comida a un resultado de glucemia se guarda un recordatorio de después de la comida en el medidor.
- Al marcar resultados de glucemia con un marcador de después de la comida, el medidor proporciona más información sobre sus resultados de medición que le sirve de ayuda a Ud. y al personal sanitario que le atiende en la gestión de su diabetes

- · Póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende para determinar la hora de su medición de después de la comida.
- Seleccione 1 hora, 1,5 horas o 2 horas para que se emitan los recordatorios de después de la comida.




Encienda el medidor brevemente . En el Menú principal, pulse para resaltar Ajustes.







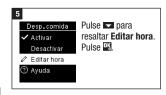



Desp. comida: 1 hora, 1,5 horas o 2

Pulse 

□ para desplazar 

hasta la opción.

Pulse III para guardar y volver al menú anterior

#### Último resultado

Seleccione si el resultado de alucemia anterior aparece o no iunto al resultado de glucemia actual. No se muestran los resultados de glucemia de mediciones realizadas hace más de 24 horas.



anterior aparece con el resultado

actual de glucemia.










# Idioma



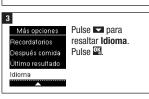




#### Formato de hora


Elija el formato de la hora (reloj de 12 horas o de 24 horas) que aparecerá en el medidor.



Encienda el medidor pulsando brevemente La En el Menú principal, pulse para resaltar Ajustes.



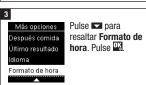

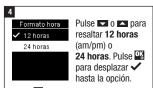

Pulse para guardar el formato de la hora y volver al menú anterior.

#### Resumen

- Los resultados de glucemia se guardan desde el más reciente al más antiguo.
- El medidor guarda automáticamente hasta 720 resultados de glucemia en la memoria con la hora y la fecha de la medición y los marcadores de resultados de glucemia, si los hay.
- Cuando ya hay 720 resultados de glucemia guardados en la memoria, al añadir un resultado de glucemia nuevo se borra el resultado más antiguo.
- Solo los resultados de glucemia a los que se ha añadido un marcador de medición en ayunas, antes de la comida, después de la comida o al acostarse están incluidos en el promedio del marcador correspondiente.
- Todos los resultados de glucemia están incluidos en los promedios generales de 7, 14, 30 y 90 días independientemente del marcador añadido.
- Los resultados de control se guardan en la memoria, pero no se pueden consultar en el medidor. Para ver los resultados de control guardados, transfiéralos a una aplicación de software compatible.
- Los resultados de control no están incluidos en los promedios ni en los informes de glucemia.
- Cuando ya hay 32 resultados de control guardados en la memoria, al añadir un resultado de control nuevo se borra el resultado más antiguo.

#### ∧ ADVERTENCIA

## Riesgo de un incidente grave para la salud

Si usa un único resultado de medición guardado en la memoria para modificar su tratamiento, podría realizar cambios terapéuticos inadecuados. Por ello, no modifique su tratamiento basándose en un único resultado de medición en la memoria. Póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende antes de modificar su tratamiento basándose en los resultados de medición en la memoria.

#### NOTA

El medidor tiene la capacidad de sincronizar automáticamente la hora y la fecha cuando está sincronizado con un dispositivo móvil que actualice automáticamente la hora y la fecha del medidor. Aunque utilice el medidor en múltiples zonas horarias, los resultados se guardan desde el más reciente al más antiguo, y no por la hora y la fecha.

#### Diario




Encienda el medidor pulsando brevemente

3. En el Menú principal pulse para resaltar Mis datos. Pulse 3.



Diario está resaltado. Pulse 🍱.

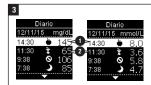

Pulse o para desplazarse por el **Diario**.

Resultado de glucemia más reciente

2º resultado de glucemia más reciente 2.

Para ver los detalles de un resultado de glucemia, pulse → 0 → para resaltar el resultado de glucemia.
Pulse → Los detalles del resultado de glucemia mostrados abajo solo aparecen si la función Intervalos ideales está activada o se han añadido marcadores a un resultado de glucemia.

## Resultado de glucemia más reciente



0 8 . 0 12/11/15


2 Encima interv.

## 2º resultado de glucemia más reciente





#### **Promedios**

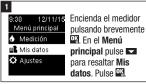








Pulse para resaltar un periodo de tiempo (90 días en el ejemplo). Pulse

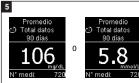


Pulse ■ para volver al menú anterior si desea consultar otro periodo de tiempo O BIEN pulse ■ o ■ para desplazarse por otros promedios.

#### Porcentaje del intervalo ideal (%)

El porcentaje del intervalo ideal (%) le permite ver el porcentaje de los resultados de glucemia de total de datos, antes de la comida, después de la comida, en ayunas y al acostarse que están por encima, dentro o por debajo de sus intervalos ideales.

- Los resultados del % Intervalo ideal pueden visualizarse para periodos de 7. 14. 30 o 90 días.
- Los intervalos ideales deben estar ajustados en el medidor para poder consultar los resultados del % Intervalo ideal

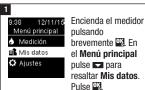









Aparece el % Interv. ideal (para el ejemplo de Antes comida). El número total de resultados incluidos en el

% Intervalo ideal aparece en la parte inferior de la pantalla.

Pulse para volver al menú anterior.

#### NOTA

El análisis de los resultados de glucemia guardados en el medidor es una manera eficaz, para Ud. y para el personal sanitario que le atiende, de determinar si está controlando bien su diabetes. Dicho análisis es una valiosa herramienta para mejorar el control de la diabetes. Cuando añada marcadores a los resultados de glucemia hágalo con cuidado. Los marcadores incorrectos pueden provocar que el medidor detecte patrones inadecuados si la función Patrones está ajustada en **Activar**.

#### Valores bajos/altos

El personal sanitario que le atiende puede decirle cuál es el intervalo ideal de glucemia adecuado para Ud. Es muy importante que sus valores de glucemia permanezcan dentro del intervalo ideal.

- La función Intervalos ideales tiene que estar ajustada en el medidor para poder consultar los resultados de medición de los valores bajos/altos (consulte los detalles en el apartado Intervalos ideales del capítulo Ajustes del medidor).
- Los valores bajos y valores altos de glucemia incluyen únicamente los resultados de glucemia que están por encima o por debajo de los intervalos ideales ajustados en el medidor.
- Los valores bajos o valores altos se guardan en el medidor durante 30 días.

Es posible seleccionar valores bajos y valores altos de glucemia para resultados de glucemia de total de datos, antes de la comida, después de la comida, en ayunas o al acostarse.

Símbolo	Nombre	Descripción
$\odot$	Total datos	Incluye los resultados de glucemia bajos y altos en base a los intervalos ideales ajustados en el medidor.
Ď	Antes comida	Puede ver resultados de glucemia bajos o altos marcados con un marcador de antes de la comida para total de datos, antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena y antes del aperitivo.*
Ĭ	Después comida	Puede ver resultados de glucemia bajos o altos marcados con un marcador de después de la comida para total de datos, después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena y después del aperitivo.*
0	En ayunas	Incluye los resultados de glucemia bajos o altos marcados como En ayunas.
)	Al acostarse	Incluye los resultados de glucemia bajos o altos marcados como Al acostarse.

\*Los resultados de glucemia para antes y después de comidas específicas solo están disponibles si la función Patrones está ajustada en **Activar**.







Si la función Intervalos ideales está activada:

Pulse para seleccionar Valores bajos o Valores

altos (Valores altos en el ejemplo).

Valores baj/alt Datos no disponibles . Active los intervalos ideales

para controlar los

valores bai Jalt.

Si la función Intervalos ideales NO ha estado activada durante los últimos 30 días:

Aparece este mensaje en el medidor (consulte los detalles para activar la función Intervalos ideales en el apartado Intervalos ideales del capítulo Ajustes del medidor).





Si en el diario se han guardado resultados de medición con marcadores detallados de comidas:

Es posible que el medidor solicite que seleccione las categorías detalladas que desea visualizar. Pulse ■ para resaltar una categoría (antes Desayuno en el ejemplo). Pulse ■.





Aparecen los datos seleccionados (Valores altos en el ejemplo). Pulse para desplazarse por los resultados de glucemia.

Pulse spara volver al menú anterior.

#### NOTA

El análisis de los resultados de glucemia guardados en el medidor es una manera eficaz, para Ud. y para el personal sanitario que le atiende, de determinar si está controlando bien su diabetes. Dicho análisis es una valiosa herramienta para mejorar el control de la diabetes. Cuando añada marcadores a los resultados de glucemia hágalo con cuidado. Los marcadores incorrectos pueden provocar que el medidor detecte patrones inadecuados si la función Patrones está ajustada en **Activar**.

#### Patrones 4 8 1

- La función Patrones muestra únicamente Patrones bajos o Patrones altos en base a los marcadores añadidos a los resultados de glucemia durante los últimos 7 días.
- Un patrón se genera cuando en un periodo de 7 días se detectan 2 resultados de glucemia por debajo o 3 resultados de glucemia por encima del intervalo con el mismo marcador.

Los patrones se visualizan en el medidor de 3 maneras:



Los patrones detectados por el medidor pueden visualizarse en el Menú principal como:

Patrones	Se han detectado patrones altos y bajos	Los patrones incluyen los siguientes resultados de glucemia marcados con marcadores: antes del desayuno, después del
Patrón alto / Patrones altos	Se han detectado uno o varios patrones altos	
Patrón bajo / Se han detectado uno o vario Patrones bajos patrones bajos		desayuno, antes del almuerzo, después del almuerzo, antes de la
Sin patrones	No hay ningún patrón activo basado en resultados de glucemia de los últimos 7 días	cena, después de la cena, antes del aperitivo, después del aperitivo, en ayunas o al acostarse (consulte el apartado Añadir marcadores a resultados de glucemia del capítulo Mediciones de glucemia).
En blanco	La función Patrones está	
	ajustada en <b>Desactivar</b>	



Encienda el medidor pulsando brevemente . En el Menú principal pulse para







volver al menú anterior.


# Transferencia de datos inalámbrica

Esta función permite la transmisión inalámbrica de datos desde el medidor a otro dispositivo.







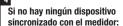



Sincron. disp. El medidor le indica que debe sincronizar un dispositivo con el medidor (consulte los detalles en el apartado Primera

sincronización del capítulo Comunicación inalámbrica y sincronización del medidor).

#### Si el medidor ya está sincronizado con un dispositivo como mínimo:



Pulse o para elegir un dispositivo inalámbrico para la transferencia de datos.



El medidor transfiere los datos al dispositivo.

Enchufe el extremo pequeño del cable USB en el medidor.



Enchufe el extremo grande del cable USB en un puerto USB del ordenador.

Si el medidor está apagado, se encenderá.

#### 3

Inicie el software para el tratamiento de la diabetes e inicie una transferencia de datos



El medidor transfiere los datos al software.

#### Transferencia de datos con un cable USB

Esta función permite transferir datos mediante cable USB desde el medidor al software especial para el tratamiento de la diabetes de un ordenador.

#### Resumen

Si lo desea puede sincronizar de modo inalámbrico y automáticamente su información sobre la diabetes con un dispositivo móvil. El procedimiento para establecer una conexión entre el medidor y otro dispositivo se denomina sincronización. Necesitará una aplicación en el dispositivo móvil que pueda aceptar los datos del medidor.

Ajuste	Opciones	Función
Modo avión	Activar / Desactivar	Seleccione si la comunicación
		inalámbrica está disponible o no.
		Activar: la comunicación inalámbrica no
		está disponible.
		Desactivar: la comunicación inalámbrica está disponible.
Disp. predet.	Lista de dispositivos	Cuando hay más de 1 dispositivo
(Dispositivo	sincronizados con el	sincronizado, seleccione el dispositivo
predeterminado)	medidor	con el que se comunicarán las funciones
F / / /	A-ti / Dti	Envío automático y Sincronizar hora.
Envío automático	Activar / Desactivar	Seleccione si los datos se envían automáticamente al dispositivo
		sincronizado predeterminado después de
		cada medición o no.
		Activar: los datos se envían
		automáticamente al dispositivo
		sincronizado predeterminado.
		Desactivar: los datos no se envían
		automáticamente al dispositivo
		sincronizado predeterminado.
Sincronizar hora	Activar / Desactivar	Seleccione si se deben sincronizar la
		hora y la fecha con el dispositivo sincronizado predeterminado o no.
		Activar: la hora y la fecha del medidor se sincronizan con la hora y la fecha del
		dispositivo sincronizado predeterminado.
		Desactivar: la hora y la fecha del medidor
		no se sincronizan con la hora y la fecha del
		dispositivo sincronizado predeterminado.
Sincronización	Sincronizar disp.	Seleccione si se debe sincronizar un
	(Sincronizar	dispositivo o eliminar un dispositivo
	dispositivo) / Eliminar	sincronizado.
	sincron. (Eliminar	
	sincronización)	

#### Primera sincronización

Los pasos descritos a continuación son para la primera sincronización.

Es posible sincronizar hasta 5 dispositivos con el medidor en cualquier momento.

Solo se puede sincronizar un dispositivo tras otro con el medidor.

El medidor y el dispositivo a sincronizar deben encontrarse a menos de 1 metro de distancia entre sí.

Prepare el dispositivo para la sincronización. Consulte las instrucciones del dispositivo para obtener información sobre la sincronización.









El dispositivo móvil muestra una lista de los dispositivos encontrados, incluido el medidor. Seleccione el medidor en la lista. Cuando el medidor lo indique, introduzca el código visualizado en el medidor del paso 5 en el dispositivo que desea sincronizar.




Una vez completada la sincronización, aparecen ✓ y el nombre del dispositivo sincronizado

Pulse 🍱 para volver al menú anterior.

#### Modo avión


Seleccione si la comunicación inalámbrica está disponible o no. Cuando el **Modo avión** está activado, aparece en la barra de título y la comunicación inalámbrica no está disponible.

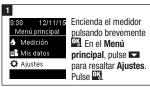

11/16/2021 8:39:39 AM





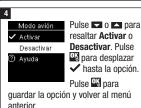




#### Dispositivo predeterminado

Cuando hay más de 1 dispositivo sincronizado, seleccione el dispositivo predeterminado para las funciones **Envío** automático y **Sincronizar hora**.








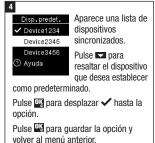

#### Envío automático

Seleccione si los datos se envían automáticamente al dispositivo sincronizado predeterminado después de cada medición o no

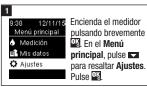









#### Sincronizar hora

Seleccione si se deben sincronizar la hora y la fecha con el dispositivo sincronizado predeterminado o no.

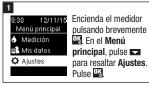

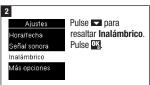





#### Sincronizar dispositivos adicionales

Con este procedimiento se añade otro dispositivo sincronizado (suponiendo que ya haya 1 dispositivo sincronizado).

Es posible sincronizar 5 dispositivos.


Si tiene 5 dispositivos sincronizados, debe eliminar una sincronización para poder añadir otro dispositivo.

El dispositivo que elija permanecerá como predeterminado hasta que lo cambie.







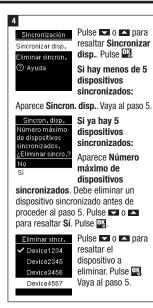

Prepare el otro dispositivo para la sincronización. Consulte las instrucciones del otro dispositivo para obtener información sobre la sincronización.



48

\_08682151061\_0.08682151061\_0.1indd 48 11/16/2021 8:39:47 AM

7

El dispositivo móvil muestra una lista de los dispositivos encontrados, incluido el medidor. Seleccione el medidor en la lista. Cuando el medidor lo indique, introduzca el código visualizado en el medidor del paso 6 en el dispositivo que desea sincronizar.



Una vez completada la sincronización, aparecen ✓ y el nombre del dispositivo sincronizado.
Pulse ☑



Si hay más de 1 dispositivo sincronizado, el medidor preguntará si desea que el nuevo dispositivo

sea el dispositivo predeterminado.
Pulse o para resaltar No o Sí.
Pulse para guardar la opción y
volver a Sincronización.

Pulse nara volver al menú anterior.

#### Eliminar sincronización

Con este procedimiento se elimina un dispositivo sincronizado (suponiendo que haya como mínimo 1 dispositivo sincronizado).

Es posible sincronizar 5 dispositivos. Si tiene 5 dispositivos sincronizados, debe eliminar una sincronización antes de sincronizar otro dispositivo.

El dispositivo que elija permanecerá como predeterminado hasta que lo cambie.



Encienda el medidor pulsando brevemente ☑3. En el Menú principal, pulse ☑ para resaltar Ajustes. Pulse ☑3.



Pulse para resaltar Inalámbrico.
Pulse ...



Pulse para resaltar Sincronización.
Pulse 🖾



② Ayuda

Pulse o para resaltar Eliminar sincron.. Pulse ok.



Pulse o a para resaltar el dispositivo a eliminar. Pulse a para guardar la opción.



Si el dispositivo seleccionado no es el dispositivo predeterminado:

Se elimina la sincronización.

Aparecen el nombre del dispositivo eliminado y 🗸.



Si el dispositivo seleccionado es el dispositivo predeterminado:

El medidor le indica que seleccione un

nuevo dispositivo predeterminado. Si solo queda 1 dispositivo sincronizado, éste será el dispositivo predeterminado. Aparece la lista de dispositivos sincronizados.



Resalte el nuevo dispositivo predeterminado y pulse . Aparecen el nombre del dispositivo eliminado

y ✓ junto con el nuevo dispositivo predeterminado.

#### Mantenimiento del medidor

El medidor comprueba sus propios sistemas automáticamente cada vez que lo enciende y le comunica si hay algún problema. Consulte el apartado Mensajes de error de este capítulo.


Si se le cae el medidor o piensa que los resultados no son correctos, póngase en contacto con Roche.

### ∧ ADVERTENCIA

#### Riesgo de lesiones potencialmente mortales


Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Consulte la advertencia en la introducción de estas instrucciones de uso para obtener información adicional.

#### Cambiar las pilas

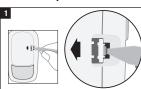

Abra la tapa del compartimento de las pilas a prueba de niños introduciendo un objeto estrecho, como un bolígrafo, en la ranura (vea la imagen superior). Empuje la pestaña en la dirección de la flecha y levante la tapa del compartimento de las pilas.



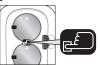

Pulse el botón 🖫 para extraer las pilas usadas. Retire las pilas usadas. Pulse y mantenga pulsada la tecla On/Off/Set/ OK en la parte frontal del medidor durante al menos 2 segundos.



Deslice las pilas nuevas por debajo de las pestañas negras y del botón

símbolo (+) hacia

arriba. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas en su sitio y ciérrela de modo que encaje. Deseche inmediatamente las pilas usadas.

#### NOTA

- Tenga siempre a mano un juego de pilas de reserva.
- La duración de la pila puede variar a causa de distintos factores, tales como la temperatura y el fabricante de la pila.
- El medidor usa dos pilas de litio de 3 voltios del tipo botón CR2032. Este tipo de pila está a la venta en muchos establecimientos.
- Sustituya siempre ambas pilas al mismo tiempo por otras de la misma marca.
- Los datos del diario no se pierden al cambiar las pilas.

#### Limpiar y desinfectar el medidor

Mantenga el medidor libre de polvo. Si necesita limpiarlo o desinfectarlo, siga estas instrucciones cuidadosamente para obtener el mejor resultado posible.

### ∧ ADVERTENCIA

#### Riesao de infección

Si el medidor es manejado por una segunda persona para ayudar al paciente a realizar las mediciones, el medidor debe ser desinfectado antes de ser manejado por dicha segunda persona.

### ∧ ADVERTENCIA

## Riesgo de un incidente grave para la

- No limpie ni desinfecte el medidor mientras realiza una medición de glucemia o un control del funcionamiento.
- No permita que entre líquido en las aperturas del medidor.
- No pulverice nada sobre el medidor.
- No sumerja el medidor en un líquido.

## Cuándo limpiar o desinfectar el medidor:

- Limpie el medidor para retirar la suciedad visible u otros materiales.
- Desinfecte el medidor entre cada uso en un paciente.

#### Qué limpiar o desinfectar:

- El área alrededor de las ranuras y aperturas
- · La pantalla del medidor
- Toda la superficie del medidor



Asegúrese de que el medidor esté apagado.

Limpie cuidadosamente la superficie del medidor con un paño ligeramente húmedo (exprima el paño para eliminar el exceso de líquido) y use una de las siguientes soluciones:

#### Para limpiar el medidor

Un lavavajillas suave mezclado con agua

#### Para desinfectar el medidor

Isopropanol al 70 %

Nota: durante la desinfección, asegúrese de que la superficie del medidor se mantenga húmeda con isopropanol durante 2 minutos. Puede ser necesario seguir limpiando la superficie con paños humedecidos con isopropanol.



Seque el medidor con un paño suave.

\_08682151061\_08682151061\_01.indd 52 11/16/2021 8:39:59 AM

#### Mensajes de error

### 

## Riesgo de un incidente grave para la salud

Si usa un mensaje de error para modificar su tratamiento, podría tomar decisiones terapéuticas inadecuadas.

- Nunca tome decisiones terapéuticas basadas en un mensaje de error.
- Si tiene dudas o ve cualquier otro mensaje de error en la pantalla, póngase en contacto con Roche.



El medidor no se enciende o la pantalla está en blanco.

- Las pilas están gastadas.

  Cómbigles per pilas pueses
- Cámbielas por pilas nuevas.

 La pantalla está estropeada. / El medidor está defectuoso.

Póngase en contacto con Roche.

· Temperaturas extremas.

Coloque el medidor en un área con una temperatura más moderada.



El medidor está conectado a un ordenador y no es posible realizar una medición.

Desconecte el cable USB y realice una medición O BIEN retire la tira reactiva e inicie una transferencia de datos.



Se ha perdido la conexión entre el medidor y el ordenador.

Desconecte y vuelva a conectar el cable USB e intente establecer la conexión de nuevo. Póngase en contacto con Roche si la conexión se vuelve a perder.



No hay conexión entre el medidor y el ordenador.

Conecte el cable USB e intente establecer la conexión de nuevo.



Los resultados de glucemia no se han transferido a un dispositivo sincronizado.

Asegúrese de que el dispositivo sincronizado está encendido y se encuentra dentro del alcance del medidor.



Los datos no se han podido transferir del medidor al ordenador.

Compruebe el ordenador o el cable USB.



Los datos no se pueden enviar a un dispositivo sincronizado porque el medidor está en Modo avión. Intente transferir los datos de nuevo cuando el medidor no esté en Modo avión.



Uno o más resultados de glucemia se han excluido de los promedios seleccionados porque los resultados de glucemia no son válidos o están fuera del intervalo de medición del sistema

A Resultados
excluidos
Uno o más resultados pueden excluirse de los
datos del %
Intervalo ideal.

Uno o más resultados de glucemia se han excluido de los datos seleccionados del % Intervalo ideal porque los resultados de glucemia no son válidos.



Uno o más resultados de glucemia se han excluido de los datos bajos/altos seleccionados porque los resultados de glucemia no son válidos.



La fecha introducida no es válida. Introduzca la fecha correcta.

Amodo avión activo
Comunicación inalámbrica está desactivada. El ajuste seleccionado se quardó.

Se ha cambiado un ajuste del medidor cuando este se encontraba en Modo avión.

El cambio del ajuste no tendrá efecto hasta que se desactive el Modo avión.

▲Modo avión activo

Comunicación inalámbrica está desactivada.
La sincronización no está permitida

La sincronización con otro dispositivo no se puede realizar cuando el medidor está en el Modo avión. Intente realizar la sincronización de nuevo cuando el medidor no esté en Modo avión. AEnvío autom.
no finalizado
Transf. no finalizada. El disp.
sincronizado debe
estar dentro del
rango y encendido

El resultado de glucemia no se ha enviado al dispositivo sincronizado predeterminado. La transferencia todavía está pendiente.

Coloque el medidor y el dispositivo sincronizado más cerca uno de otro.

▲Error de sincronización Intente sincronizar de nuevo.

El medidor no ha podido sincronizarse con un dispositivo.

Intente realizar la sincronización de nuevo.

⊗Error de tira reactiva Vuelva a insertar la tira reactiva o sustitúyala por una nueva.

La tira reactiva puede estar dañada, no está insertada correctamente o ha sido usada anteriormente.

Retire la tira reactiva y vuelva a insertarla o sustitúyala si está dañada o usada

11/16/2021 8:40:06 AM



Se ha producido un error en el medidor o en la tira reactiva.
Este mensaje de error puede aparecer si el tubo de tiras reactivas no ha estado cerrado herméticamente. Las tiras reactivas pueden haber sido dañadas debido a un almacenamiento o maneio incorrectos.

## Nunca tome decisiones terapéuticas basadas en un mensaje de error.

Repita la medición de glucemia. Si el mensaje de error E-3 aparece de nuevo, realice un control del funcionamiento con solución de control y una tira reactiva nueva. Consulte el apartado Realizar un control del funcionamiento del capítulo Controles del funcionamiento. Si el mensaje de error E-3 aparece de nuevo, utilice un método alternativo para medir su glucemia, como un medidor y una tira reactiva de reserva. Si con el método alternativo obtiene un resultado de glucemia extremadamente alto, o si no dispone de un método alternativo,

#### póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende inmediatamente.

En casos poco frecuentes, el mensaje de error E-3 puede indicar que su nivel de glucemia es extremadamente alto y superior al intervalo de medición del sistema. Consulte el apartado Resultados de glucemia no esperados del capítulo Mediciones de glucemia para averiguar otras posibles causas del mensaje de error.



La tira reactiva no ha absorbido suficiente sangre o solución de control para realizar la medición de glucemia o el control del funcionamiento o la muestra ha sido aplicada después de que la medición de glucemia o el control del funcionamiento comenzara. Deseche la tira reactiva y repita la medición de glucemia o el control del funcionamiento.



La sangre o la solución de control se ha aplicado a la tira reactiva antes de que apareciera **Aplicar gota** en la pantalla. Deseche la tira reactiva y repita la medición de glucemia o el control del funcionamiento.



Se ha producido un error electrónico. Retire las pilas, pulse y mantenga pulsada la tecla On/Off/Set/OK durante al menos 2 segundos y vuelva a insertar las pilas. Realice una medición de glucemia o un control del funcionamiento.

Error de
temperatura
Sitúe el medidor
en una zona de
temperatura
adecuada.
(E-8)

La temperatura es superior o inferior al intervalo adecuado para el sistema. Consulte las condiciones para el funcionamiento del sistema en el prospecto de las tiras reactivas. Vaya a un sitio con las condiciones apropiadas y repita la medición de glucemia o el control del funcionamiento. No caliente ni enfríe el medidor por medios artificiales.



Las pilas pueden estar gastadas. Vuelva a encender el medidor. Si se encuentra en un entorno frío, desplácese a un área con una temperatura más moderada y repita la medición. Si el mensaje vuelve a aparecer tras varios intentos, sustituya las pilas. Si el mensaje aparece de nuevo después de haber cambiado las pilas, vuelva a retirar las pilas, pulse y mantenga pulsada la tecla On/Off/Set/OK durante al menos 2 segundos y vuelva a insertar las pilas.



Los ajustes de la hora y de la fecha podrían ser incorrectos.

Asegúrese de que la hora y la fecha sean correctas y ajústelas si es preciso.



La tira reactiva puede estar dañada. Repita la medición de glucemia o el control del funcionamiento con una tira reactiva nueva.




Es posible que la muestra de sangre contenga un nivel elevado de ascorbato.

Póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende.



Puede haber líquido o materiales extraños en la ranura de la tira reactiva.

Retire la tira reactiva y vuelva a insertarla o repita la medición de glucemia o el control del funcionamiento con una tira reactiva nueva. Si el problema persiste, póngase en contacto con Roche.

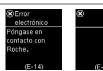

Se ha producido un error electrónico. Póngase en contacto con Roche.

Sincron, hora
Se ha actualizado
la hora del medidor para igualarla
con la hora del
disp, sincronizado

La hora y la fecha del medidor se han modificado para coincidir con las del dispositivo sincronizado.



No hay resultados en el diario.

08682151061A 08682151061 01.indd 58





del intervalo para los datos

seleccionados.



La función Intervalos ideales está ajustada en **Desactivar** y no hay resultados para los datos del % Intervalo ideal guardados en el medidor.

Valores baj/alt
Datos no disponibles. Active los
intervalos ideales
para controlar los
valores baj Jalt.

La función Intervalos ideales está ajustada en **Desactivar** y no hay resultados para los datos bajos/altos guardados en el medidor.



### 

No hay resultados guardados en el medidor para los datos seleccionados.



La función Patrones está ajustada en **Activar** pero no hay patrones activos quardados en el medidor.





La función Patrones está ajustada en **Desactivar**.



El nivel de glucemia puede estar por encima del intervalo de medición del sistema.

Consulte el apartado Resultados de glucemia no esperados del capítulo Mediciones de glucemia.



El nivel de glucemia puede estar por debajo del intervalo de medición del sistema.

Consulte el apartado Resultados de glucemia no esperados del capítulo Mediciones de glucemia.



Las pilas están casi gastadas.
Cambie las pilas ahora. Si el símbolo aparece de nuevo después de haber cambiado las pilas, vuelva a retirar las pilas, pulse y mantenga pulsada la tecla On/Off/Set/OK durante al menos 2 segundos y vuelva a insertar las

59

pilas.

### Limitaciones del producto

Encontrará la información más actualizada sobre las especificaciones y las limitaciones del producto en los prospectos que acompañan a las tiras reactivas y a las soluciones de control.

Especificaciones	
Volumen de sangre	Consulte el prospecto de las tiras reactivas.
Tipo de muestra	Consulte el prospecto de las tilas reactivas.
Tiempo de medición	
Intervalo de medición	
Condiciones para el almacenamiento de las tiras reactivas	
Condiciones para el funcionamiento del sistema	
Condiciones para el almacenamiento del medidor	Temperatura: de -25 a +70 °C
Capacidad de memoria	720 resultados de glucemia y 32 resultados de controles del funcionamiento con hora y fecha
Apagado automático	90 segundos
Suministro de corriente	Dos pilas de litio de 3 voltios (tipo botón CR2032)
Pantalla	LCD
Medidas	$80 \times 47 \times 20$ mm (largo × ancho × alto)
Peso	Aprox. 48 g (pilas incluidas)
Modelo	Aparato de bolsillo
Clase de protección	III
Tipo de medidor	El medidor Accu-Chek Guide es apropiado para uso continuo.
Condiciones para el almacenamiento de la solución de control	Consulte el prospecto de la solución de control.
Interfaces	USB: conector micro B; tecnología <i>Bluetooth</i> ® de
500	baja energía; Continua Certified® con un gestor
Continua	Continua Certified.
Conectividad de radiofrecuencia	Tecnología Bluetooth de baja energía, la cual funciona en la banda de frecuencias de 2,402 GHz a 2,480 GHz con una potencia máxima transmitida de 0 dBm (1 mW).

Compatibilidad electromagnética – El medidor cumple los requisitos de emisiones electromagnéticas según EN 61326-2-6. En consecuencia, la emisión electromagnética es baja. No es de esperar una interferencia en otros aparatos eléctricos.

**Análisis de funcionamiento** – Consulte el prospecto de las tiras reactivas.

**Método de medición** – Consulte el prospecto de las tiras reactivas.

Declaración de conformidad — Por la presente, Roche declara que el tipo de equipo radioeléctrico medidor de glucemia Accu-Chek Guide es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente página web:

http://declarations.accu-chek.com

Protocolo de comunicación – El medidor de glucemia Accu-Chek Guide posee la certificación Continua Certified. La certificación Continua Certified significa que este producto cumple las normas aplicables IEEE 11073-10417 y que ha sido probado y certificado conforme a las Directrices de diseño Continua 2014, que incluyen la especificación de glucemia para Bluetooth, Bluetooth SIG, Glucose Profile, Version 1.0 y Bluetooth SIG, Glucose Service. Version 1.0.

# Información sobre la seguridad del producto

#### NOTA

- Los campos electromagnéticos intensos pueden impedir el buen funcionamiento del medidor. No utilice el medidor cerca de fuentes de radiación electromagnética intensa.
- Para evitar descargas electrostáticas, no utilice el medidor en un ambiente muy seco, especialmente si en este se encuentran materiales sintéticos.

#### Desechar el medidor

### ∧ ADVERTENCIA

#### Riesgo de infección

Durante las mediciones de glucemia el medidor puede entrar en contacto con sangre. Por ello los medidores usados pueden representar un riesgo de infección.

Retire la pila o las pilas antes de desechar el medidor.

Deseche los medidores usados de acuerdo con las normas de eliminación locales. Diríjase a la autoridad competente para obtener información respecto a la eliminación correcta.

El medidor no entra en el área de vigencia de la Directiva Europea 2012/19/UE (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)).

Deseche las pilas usadas de acuerdo con las normas medioambientales locales.

Este producto incluye componentes internos que contienen una sustancia extremadamente preocupante (SVHC por sus siglas en inglés): 1,2-dimetoxietano (número CAS 110-71-4),

hexabromociclododecano (número CAS 25637-99-4), titanato de plomo (número CAS 12060-00-3) y/o titanato circonato de plomo (número CAS 12626-81-2), presentes en una concentración superior al 0,1 % en peso, tal como se identifica en el reglamento REACH y se ha añadido a la lista de sustancias candidatas.

No hay exposición directa a la sustancia y, por lo tanto, no hay riesgo cuando el instrumento se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso.

#### Explicación de los símbolos

En el envase, en la placa de características y en las instrucciones de uso del medidor Accu-Chek Guide puede que encuentre los siguientes símbolos.

[]i	Consúltense las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónicas
<u> </u>	Precaución, observe las advertencias de seguridad en las instrucciones de uso del producto.
1	Límites de temperatura
	Fecha de caducidad
*	Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
+ 1	Pila de 3 voltios tipo botón CR2032
₩	Riesgos biológicos – Los medidores usados pueden representar un riesgo de infección.
	Fecha de fabricación
IVD	Producto sanitario para diagnóstico in vitro
25	Producto para autodiagnóstico
	Prueba diagnóstica en el lugar de asistencia al paciente
***	Fabricante
UDI	Identificador único del producto
GTIN	Número mundial de artículo comercial
REF	Número de catálogo
SN	Número de serie
LOT	Número de lote
(€	Cumple las disposiciones de la legislación aplicable de la UE

#### Suministros y accesorios

**Tiras reactivas**: tiras reactivas Accu-Chek Guide

**Soluciones de control**: soluciones de control Accu-Chek Guide

# Información para el personal sanitario

Este sistema puede utilizarse en entornos sanitarios profesionales como consultorios médicos, en las salas generales, en caso de sospecha de diabetes y en casos de emergencia.

#### ∧ ADVERTENCIA

#### Riesgo de infección

Todos los objetos que entran en contacto con sangre humana representan una posible fuente de infección. El personal sanitario debe seguir los procedimientos para el control de infecciones vigentes en su centro. Consulte el prospecto de las tiras reactivas para obtener más información para el personal sanitario.

#### Manipulación de las muestras

Use siempre guantes al manipular objetos contaminados con sangre. Aténgase siempre a los procedimientos vigentes para la manipulación de objetos potencialmente contaminados con material humano. Siga las normas de higiene y seguridad de su laboratorio o institución. Prepare el sitio seleccionado para la obtención de sangre según las normas locales.

Consulte el prospecto de las tiras reactivas para obtener más información sobre tipos de muestras aceptables, anticoagulantes e instrucciones de manipulación.

#### Recomendar la medición en lugares alternativos a los pacientes

Al decidir si recomendar o no la medición en lugares alternativos (AST = alternative site testing) debe tener en cuenta la motivación y el nivel de conocimiento del paciente y su habilidad para comprender aspectos relativos a la diabetes y al procedimiento AST. Si está considerando recomendar el procedimiento AST a sus pacientes, debe comprender que hay una diferencia considerable entre los resultados de medición obtenidos con sangre de la vema del dedo o la palma de la mano y la procedente del antebrazo o el brazo. La diferencia en la concentración capilar y la perfusión de la sangre en el cuerpo puede tener como consecuencia discrepancias en los resultados de glucemia en función del lugar del cuerpo del que proceda la sangre. Este efecto fisiológico varía según el individuo y puede variar para un mismo individuo dependiendo de su comportamiento v condición física relativa

Nuestros estudios acerca de mediciones en lugares alternativos en adultos diabéticos demuestran que el nivel de glucemia de la mayoría de las personas cambia más rápidamente en la sangre de la yema del dedo o la palma de la mano que en la procedente del antebrazo o el brazo. Esto es especialmente relevante cuando los niveles de glucemia bajan o suben rápidamente. Si su paciente está habituado a tomar decisiones terapéuticas basadas en los resultados de medición obtenidos con sangre de la vema del dedo o la palma de la mano, él o ella deberá tener en cuenta el desfase que afecta al resultado de medición obtenido con sangre del antebrazo o el brazo

## **9** Garantía

#### Garantía

Deberán prevalecer las disposiciones legales relativas a garantías que rigen la venta de bienes de consumo en el país de compra.

### Índice

A	L
ajustes, medidor 25	limitaciones del producto 60
después comida 32	limpieza y desinfección 52
formato de hora 35	
hora/fecha 26	M
idioma 34	mantenimiento, medidor 51
intervalos ideales 27	marcadores, añadir a resultados de
patrones 29	glucemia 15
recordatorios 31	medición de glucemia, realizar 12 medición en lugares alternativos 17, 64
señal sonora 26	mensajes de error 53
último resultado 33	mensajes de enoi 33
C	N
comunicación inalámbrica	nivel de glucemia alto 20
dispositivo predeterminado 46	nivel de glucemia bajo 20
eliminar dispositivo sincronizado 49	P
envío automático 47	patrones 40
modo avión 45	personal sanitario 64
resumen 44	pilas, cambiar 51
sincronizar dispositivos adicionales 48	promedios 37
sincronizar hora 47	,
sincronizar, primera vez 45	R
control del funcionamiento, realizar 21	resultados de control, fuera del rango
D	aceptable 23
datos del % Intervalo ideal 38	resultados de glucemia, no esperados 19
datos técnicos 60	S
diario 36	símbolos
F	IVD 63
-	pantalla del medidor 9
especificaciones del producto 60	resultado de glucemia 16
F	solución de control 21
fecha de caducidad 12, 21	suministros 64
•	Т
G	tecla, funciones 7
garantía 65	tipo de pila 60
glucemia, advertencia 14	tiras reactivas 11
Н	transferencia de datos 42
hiperglucemia 20	inalámbrica 42
hipoglucemia 20	USB 43
1	V
•	•
información sobre la seguridad del producto 61	valores bajos/altos 39
producto 01	

66

11/16/2021 8:40:24 AM

#### FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN: 2021-06

#### España

Línea de Atención al Cliente: 900 400 000

www.accu-chek.es





ACCU-CHEK y ACCU-CHEK GUIDE son marcas registradas de Roche.



CONTINUA, los logotipos de CONTINUA y CONTINUA CERTIFIED son marcas registradas, marcas de servicio o marcas de certificación de Continua Health Alliance. CONTINUA es una marca registrada en algunos países en los que se distribuye este producto, pero no en todos.

La marca denominativa *Bluetooth*® así como sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de los mismos por Roche se ha realizado bajo licencia.

Todos los demás nombres de productos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2021 Roche Diabetes Care 08682151061A-1121 08682151061(01)-1121



\_\_08682151061A\_\_08682151061\_\_01.indd 2